



# Produktübersicht

Moderne Wundversorgung

## LEGENDE

### Wundart



oberflächliche Wunde



tiefe Wunde

### Wundstadium



nekrotische Wunde



fibrinös / belegte Wunde



granulierende Wunde



epithelisierende Wunde

### Exsudationsmenge



schwache Exsudation



mäßige Exsudation



starke Exsudation

### Produkttyp

**PV**

Primärverband

**SV**

Sekundärverband

**WF**

Wundfüller

Vertrieb durch:  
Management AG für  
Integrierte Versorgung  
Königswieser Straße 5  
81475 München  
Tel: 089-75075592  
Fax: 089-75505689  
[www.miv-ag.de](http://www.miv-ag.de)  
[info@miv-ag.de](mailto:info@miv-ag.de)

Hersteller:  
TRIGOCare International GmbH  
D-51674 Wiehl  
[www.trigocare.com](http://www.trigocare.com)

Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung und Nutzung von Print- oder Bildmaterial ohne Genehmigung der TRIGOCare International GmbH. TRIGOCare International GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die TRIGOCare International GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ausgabestand: 08/2016 ©TRIGOCare International GmbH 2009-2016

## INHALTSVERZEICHNIS:

<b>Übersicht Wundversorgung</b>	4
TRIGO PHMB	5
TRIGOpad aqua	6
TRIGOfoam / TRIGOfoam adhesive	7
TRIGOcolloid foam	8
TRIGOcolloid thin	9
TRIGOfilm comfort	10
Gezielt aktiv werden	11
Bestellformular	12



**Der Patient an erster Stelle** bedeutet für uns, auf den Patienten optimierte Wundbehandlungen mit einem sorgfältig entwickelten Produktsortiment anzubieten. Wir beachten die Bedürfnisse der Patienten und alle begleitenden Umstände, mit dem Ziel effiziente und erfolgreiche Diagnosen und Therapien zu gewährleisten. Effektive Produkte, die ein ideal-feuchtes Wundmilieu fördern, sind entscheidend diese Zielsetzung zu erreichen.

Diese multidisziplinäre Aufgabe ist nicht nur eine medizinische und pflegerische Herausforderung, sondern auch der Anspruch die Kosteneffizienz zu verbessern. Effektive Produkte auszuwählen hilft Behandlungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken und trägt damit auch zu einer höheren Lebensqualität für Patienten und deren Familien bei.

TRIGOCare International GmbH wurde 2010 von der miro Verbandstoffe GmbH gegründet. Mit dem Wissen und den Erfahrungen von fast 30 Jahren im Geschäft mit Verbandstoffen hat die TRIGOCare International GmbH eine herausragende Produktauswahl für Prävention, Behandlung und Heilung geschaffen. Auf Diabetes und chronische Wunden fokussiert, entwickeln wir effektive und hochwertige Lösungen für unsere Patienten weltweit. Ein Team aus internationalen Experten stellt die Basis für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ebenso wie für die Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Produkte.

Qualitativ hochwertige Wundversorgung, hohe Standards  
und Kundenorientierung sind unsere Berufung.

## Moderne Wundversorgung auf einen Blick!


Art-N°	Bezeichnung	VE	PZN
sterile, feuchte Vlieswundauflage mit PHMB			
19010	TRIGO PHMB 10cm x 10cm	10 Stück	04906430
19050	TRIGO PHMB 10cm x 10cm	50 Stück	04906542
transparente Hydrogelaufgabe			
11010	TRIGOpad aqua 10cm x 10cm	10 Stück	09945423
11020	TRIGOpad aqua 10cm x 10cm	20 Stück	09945446
11050	TRIGOpad aqua 10cm x 10cm	50 Stück	04714423
stark absorbierender PU-Schaumverband			
14001	TRIGOfoam 7,5cm x 7,5cm	10 Stück	09945156
14002	TRIGOfoam 10cm x 10cm	10 Stück	09945127
14003	TRIGOfoam 15cm x 15cm	10 Stück	09945133

Art-N°	Bezeichnung	VE	PZN
stark absorbierender PU-Schaumverband mit Kleberand			
14010	TRIGOfoam adhesive 15cm x 15cm	10 Stück	09945110
selbstklebender Hydrocolloid-Schaumverband			
14102	TRIGOcolloid foam 10cm x 10cm	10 Stück	09944903
hydrocolloide Wundauflage			
15002	TRIGOcolloid thin 10cm x 10cm	10 Stück	09944926
15052	TRIGOcolloid thin 10cm x 10cm	50 Stück	10383232
steriler, transparenter Wundschnellverband			
16010	TRIGOfilm comfort 6cm x 7cm	50 Stück	09945015
16011	TRIGOfilm comfort 10cm x 12,5cm	50 Stück	09945009



# TRIGO PHMB

sterile, feuchte Vlieswundauflage mit Polyhexanid (PHMB)  
antimikrobieller Komplex

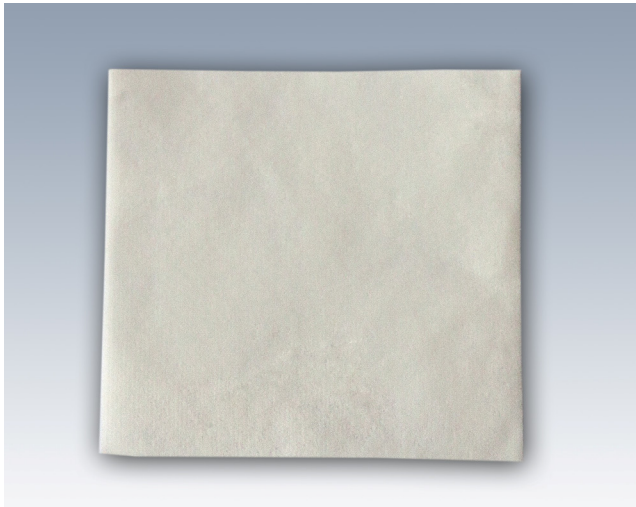

## Vorteile von TRIGO PHMB:

- antimikrobieller Komplex
- Dekontamination und Infektionsprophylaxe gegen Mikroorganismen
- vorbeugend gegen Pathogene bei akuten und chronischen Wunden
- löst den Biofilm
- Verhindert die Vermehrung von Keimen und Bakterien

TRIGO PHMB ist eine sterile, feuchte Vlieswundauflage mit Polyhexanid (PHMB) antimikrobieller Komplex. Die Lösung dient der Dekontamination und Infektionsprophylaxe gegen Mikroorganismen und schützt vorbeugend gegen bakterielle und fungizide Pathogene bei akuten und chronischen Wunden. Die besonders wirksame Kombination der Inhaltsstoffe von TRIGO PHMB löst den Biofilm, reinigt die Wunde und schafft ein optimales Wundmilieu zur Neubildung von Granulationsgewebe.

## Kontraindikationen:

- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe
- bei freiliegender Knochenhaut oder Knorpelgewebe

## Bestellinfos




Art-N°	Größe	VE	PZN
19010	10 x 10 cm	10 St.	04906430
19050	10 x 10 cm	5x 10 St.	04906542

## Anwendungsgebiete:

### akute und chronische Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko:


- Postoperative Wunden
- Hautabschürfungen
- Verbrennungen bis 2.Grades
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Diabetisches Fußsyndrom (Wagner-Armstrong-Klassifikation Grad 1)
- Dekubitus bis Grad 3
- Spalthautentnahmestellen

## Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			<b>PV</b>

# TRIGOpad aqua

## transparente Hydrogelauflage

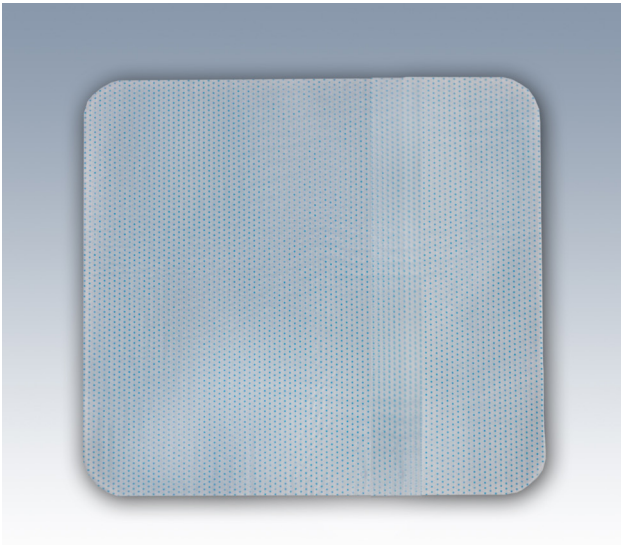

### Vorteile von TRIGOpad aqua:

- gibt Feuchtigkeit an die Wunde ab, bei gleichzeitiger Aufnahme von Exsudat
- geeignet für Wunddebridement
- verklebt nicht mit der Wunde
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase

### Anwendungsgebiete:


- oberflächliche Wunden
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Spalthautentnahmestellen
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Dekubitus bis Grad 3

### Kontraindikationen:

- Verbrennungen 3. Grades
- stark exsudierende Wunden
- im Bereich freiliegender Muskeln, Knochen und Sehnen
- infizierte Wunden

TRIGOpad aqua ist ein leicht kühlender, transparenter Hydrogelverband aus einem PU-Gel (60% Wasseranteil) mit einer gasdurchlässigen, aber flüssigkeits- und keimdichten Deckschicht aus Polyurethan. Das Gel kann sowohl Feuchtigkeit abgeben als auch Sekret aufnehmen. Hierdurch entsteht ein feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Wundheilungsprozess fördert.

TRIGOpad aqua verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel.

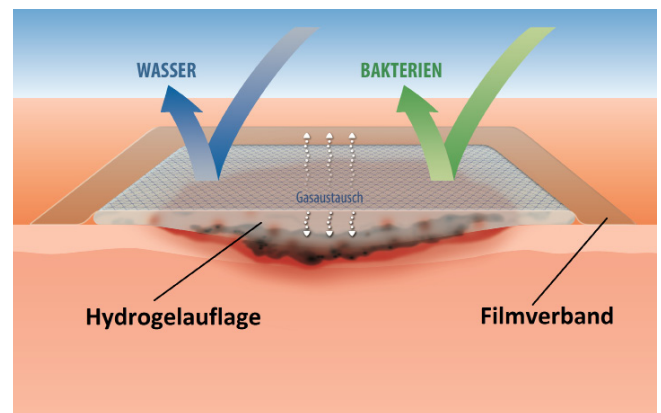

### Bestellinfos

Art-N°	Größe	VE	PZN
11010	10 x 10cm	10 St.	09945423
11020	10 x 10cm	20 St.	09945446
11050	10 x 10cm	50 St.	04714423

### Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			<b>PV, SV</b>

# TRIGOfoam / TRIGOfoam adhesive

stark absorbierender PU-Schaumverband



TRIGOfoam ist ein ein steriler, semipermeabler Schaumverband mit hohem Absorptionsvermögen aus Polyurethan. Diese äußere Schicht ist für Gase durchlässig, nicht aber für Flüssigkeiten und Bakterien. TRIGOfoam erhält ein feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Wundheilungsprozess fördert. Wundexsudat wird in der stark absorbierenden Schaumstoffschicht aufgenommen und dort zurück gehalten. Der Schaumverband ist so beschaffen, dass ein Verkleben mit der Wunde weitestgehend vermieden und ein atraumatischer Verbandwechsel ermöglicht wird.

TRIGOfoam muss zudem mit einem geeigneten Sekundärverband fixiert werden.

TRIGOfoam adhesive besitzt einen rundum laufenden, selbstklebenden Rand, der dem Anwender einen Sekundärverband erspart.



## Vorteile von TRIGOfoam und TRIGOfoam adhesive:

- hohes Absorptionsvermögen
- verklebt nicht mit der Wunde
- atraumatischer Verbandwechsel
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase

### speziell bei TRIGOfoam adhesive:

- auf Grund des selbstklebenden Randes wird kein Sekundärverband benötigt

## Anwendungsgebiete:

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Spalthautentnahmestellen
- Dekubitus
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Diabetische Fußsyndrom
- postoperative Wunden

## Kontraindikationen:

- im Bereich freiliegender Muskeln, Knochen und Sehnen
- trockene Wunden
- infizierte Wunden

## Bestellinfos TRIGOfoam

Art-N°	Größe	VE	PZN
14001	7,5 x 7,5cm	10 St.	09945156
14002	10 x 10cm	10 St.	09945127
14003	15 x 15cm	10 St.	09945133

## Bestellinfos TRIGOfoam adhesive


Art-N°	Größe	VE	PZN
14010	15 x 15cm	10 St.	09945110

## Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			<b>PV, SV</b>

# TRIGOcolloid foam

selbstklebender Hydrocolloid-Schaumverband

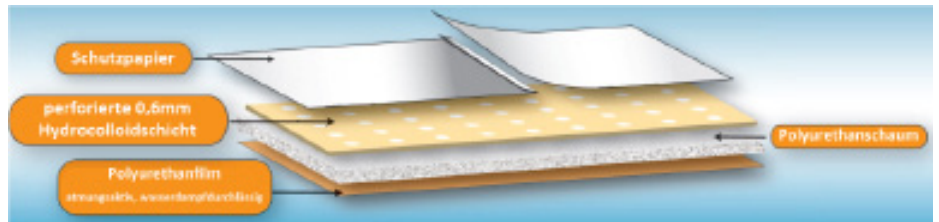

TRIGOcolloid foam ist ein selbstklebender Hydrocolloidverband mit einer Schicht aus PU-Schaum. Die darunterliegende Hydrocolloidschicht ist perforiert, dies ermöglicht dem PU-Schaum eine schnelle Aufnahme des überflüssigen Exsudats, wodurch Mazerationen weitestgehend vorgebeugt werden können.

TRIGOcolloid foam erleichtert das Exsudatmanagement und macht es anwenderfreundlich bei gleichzeitig hohem Patientenkomfort.

Die Hydrocolloid-Matrix verwandelt sich bei Kontakt mit Wundexsudat in ein weiches Gel, welches gerade bei wenig nässenden Wunden ein ideal-feuchtes Wundmilieu aufrecht erhalten kann und somit eine schnellere Wundheilung unterstützt.

## Vorteile von TRIGOcolloid foam:

- kombiniert die positiven Eigenschaften einer Hydrocolloidaufgabe mit den Produktvorteilen eines Schaumverbandes
- gutes Absorptionsvermögen
- verklebt nicht mit der Wunde
- atraumatischer Verbandwechsel
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- geringe Mazerationsgefahr durch ein hervorragendes Exsudatmanagement

## Anwendungsgebiete:

- Dekubitus
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Diabetische Fußsyndrom
- postoperative Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Hautabschürfungen
- Verbrennungen bis 2. Grades

## Kontraindikationen:

- im Bereich freiliegender Muskeln, Knochen und Sehnen
- Verbrennungen 3. Grades
- trockene Wunden
- infizierte Wunden

## Bestellinfos

Art-N°	Größe	VE	PZN
14102	10 x 10cm	10 St.	09944903


## Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			<b>PV, SV</b>



# TRIGOcolloid thin

## hydrocolloide Wundauflage

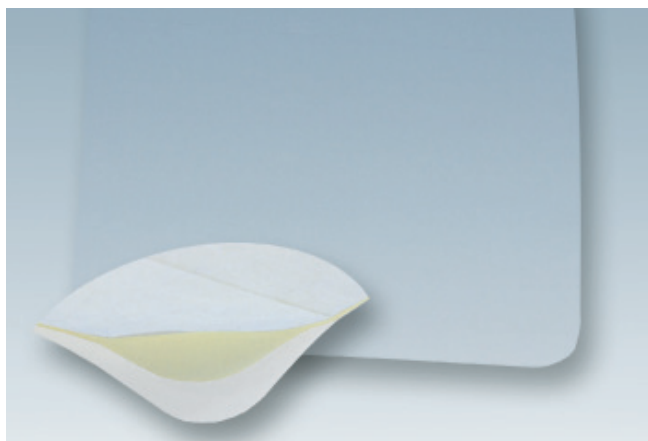

### Vorteile von TRIGOcolloid thin:

- verklebt nicht mit der Wunde
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- leicht transparent (erleichtert die Wundbeobachtung)

### Anwendungsgebiete:


- leicht bis mäßig exsudierende Wunden
- Dekubitus
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Diabetisches Fußsyndrom
- Spalthautentnahmestellen
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Hautabschürfungen, oberflächliche Wunden

### Kontraindikationen:

- Verbrennungen 3. Grades
- Wunden mit offenliegenden Knochen oder Sehnen
- Infizierte Wunden

TRIGOcolloid thin ist eine hydroaktive, sterile, selbstklebende Wundauflage zur feuchten Wundbehandlung. Der Verband erhält ein ideal-feuchtes Wundmilieu, das die physiologischen Heilungsprozesse fördert. TRIGOcolloid thin ist durchlässig für Gase jedoch nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Durch die Gelbildung bei Kontakt mit Wundexsudat ermöglicht TRIGOcolloid thin einen atraumatischen Verbandwechsel.

Diese Wundauflage ist sehr gut modellierbar und durch die hohe Flexibilität gerade im Gelenkbereich und an exponierten Stellen besonders gut anwendbar. Durch die geringe Stärke (0,3mm) ist zudem eine gute Beobachtung der Wunde möglich.

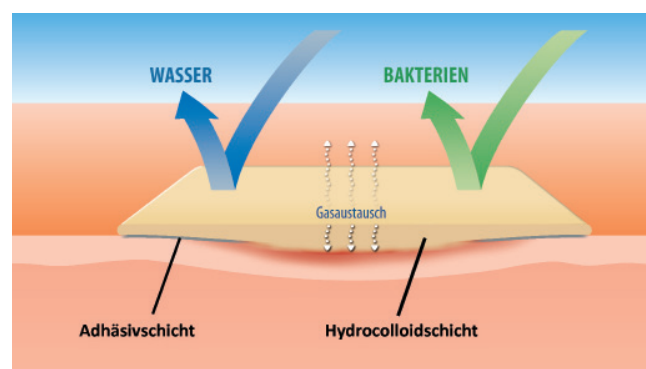

### Bestellinfos TRIGOcolloid thin

Art-N°	Größe	VE	PZN
15002	10 x 10cm	10 St.	09944926
15052	10 x 10cm	50 St.	10383232

### Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			<b>PV, SV</b>

# TRIGOfilm comfort

steriler, transparenter Wundschnellverband



TRIGOfilm comfort ist ein steriler, wasserdichter Wundverband mit einer Beschichtung aus hautfreundlichem Polyacrylatkleber. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel. TRIGOfilm comfort ist durchlässig für Gase, aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien.

Das Applizieren von TRIGOfilm comfort wird durch einen rundum laufenden, nach der Applikation zu entfernenden Papierrahmen erleichtert: der Verband kann sicher positioniert werden und ein Aufrollen der Ecken wird verhindert.

## Vorteile von TRIGOfilm comfort:

- sehr flexibel
- wasserdicht, duschen problemlos möglich
- leichtes Beobachten der Wunde möglich
- anwenderfreundliche Applikationshilfe - dadurch sehr einfaches Anlegen
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- erhält ideal-feuchtes Wundmilieu

## Bestellinfos TRIGOfilm comfort

Art-N°	Größe	VE	PZN
16010	6 x 7cm	50 St.	09945015
16011	10 x 12,5cm	50 St.	09945009

## Anwendungsgebiete:

- oberflächliche Wunden
- kleinere Hautverletzungen (Abschürfungen, leichte Verbrennungen)
- Fixierung von Wundverbänden (z.B. TRIGOpad aqua, TRIGOfilm)



mittige Schutzfolie von der nicht klebenden Seite entfernen



Schutzfolie von der klebenden Seite entfernen



Verband auf die Wunde applizieren



Rahmen langsam abziehen und Ränder des Verbandes glatt streichen



## Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			<b>PV, SV</b>

# Gezielt aktiv werden



Produkte	 <b>Wundstadium</b> nekrotische Wunde fibrinöse Wunde granulierende Wunde epithelisierende Wunde	 <b>Wundtiefe</b> = tief = oberflächlich	 <b>Exsudationsgrad</b> schwach mittel stark	<b>Sekundärverband erforderlich</b>	<b>Möglichkeiten der Kombintation</b>	<b>Primär-/ Sekundärverband</b>
 TRIGO PHMB				✓	TRIGOfoam TRIGOfilm comfort	PV
 TRIGOpad aqua				✓	TRIGOfilm comfort	PV, SV
 TRIGOfoam				✓	TRIGO PHMB TRIGOfilm comfort	PV, SV
 TRIGO foam adhesive					TRIGO PHMB	PV, SV
 TRIGOfoam					TRIGO PHMB TRIGOfilm comfort	PV, SV
 TRIGO foam adhesive					TRIGO PHMB	PV, SV
 TRIGOcolloid foam						PV, SV
 TRIGOcolloid thin						PV, SV
 TRIGOfilm comfort					TRIGOpad aqua TRIGOfoam TRIGO PHMB	PV, SV

# Bestellfax



Bestellungen per Fax: 089 - 7550 5689  
oder Email: [info@miv-ag.de](mailto:info@miv-ag.de)

Praxis: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift:  wie Praxis

Name: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Bestellnummer: \_\_\_\_\_

Art-N° oder PZN	Artikel Bezeichnung	Menge der VE

Datum	Stempel (falls vorhanden)	Unterschrift
-------	---------------------------	--------------

Haben Sie Fragen zu den Produkten?

Bitte sprechen Sie uns an!



Management AG für  
Integrierte Versorgung  
Königswieser Straße 5  
81475 München

Tel: 089-75075592  
Fax: 089-75505689  
[www.miv-ag.de](http://www.miv-ag.de)  
[info@miv-ag.de](mailto:info@miv-ag.de)

